

Großglockner Hochalpenstraße



Leben retten

AED Plus®

Defibrillatoren am höchsten
und niedrigsten Punkt Österreichs



ZOLL®



Wolframbergwerk in Mittersill



Per Knopfdruck

Der halbautomatische Defibrillator (AED) als unterstützender Lebensretter in der Ersten Hilfe



Die Anwendung und Bedienung eines Defibrillators (**AED** steht für **A**utomatisierter **E**xterner **D**efibrillator) ist einfach und auf die Bedürfnisse von **Ersthelfern** oder sogar **Laien** optimiert.

Denn nur mit Hilfe von früher und richtiger Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation) und auch dem frühen Drücken des Schock-Knopfes kann man die Opfer von Herz-Kreislauf-Stillständen mit hoher Wahrscheinlichkeit zurück ins Leben holen.

Speziell der AED bringt das oft im frühen Stadium eines Kreislauf-Stillstandes - z.B. durch einen Herzinfarkt verursacht - flimmernde Herz mit einem Stromstoß wieder in Takt, damit es kräftig Blut in die Arterien pumpen und die Zellen mit Sauerstoff versorgen kann.

Was früher nur Ärzten möglich war, gelingt mit einem AED jedem Ersthelfer und jeder Ersthelferin. Das System ist selbsterklärend und übernimmt alle notfallmäßigen Analysen und Entscheidungen zur Herzaktivität des Opfers und führt audio-visuell durch die gesamte Defibrillation und Reanimation, mittels Live-Unterstützung der Herzdruckmassage. Somit können die Ersthelfer oder Laien möglichst gut in dieser Situation das Herz des Opfers sein und per Knopfdruck zurück ins Leben helfen.



Der **AED Plus**[®] entspricht den neuesten europäischen Leitlinien zur Reanimation - ist also ERC-2015 Updates ready!



Wo der nächste Defi hängt, verrät Ihnen **definetzwerk.at**

z.B. auch im Wolframbergwerk in Mittersill und auf der Großglockner Hochalpenstraße

Der **AED Plus®** ist nicht nur im Unterhalt das kostengünstigste Gerät (5 Jahre Haltbarkeit und Standardbatterien) sondern beinhaltet zusätzlich auch eine Unterstützung in Echtzeit für die Herz-Lungen-Wiederbelebung, um dem Ersthelfer/der Ersthelferin Drücker für Drücker durch die Reanimation zu helfen.

5 Jahre Garantie - 5 Jahre Elektrodenhaltbarkeit - 5 Jahre Batterielebensdauer.

Somit hat man die geringsten, laufenden Kosten für einen AED am gesamten Markt.

Betrieb des **AED Plus® mit Standard-Lithium Batterien** (Typ 123A) - sie können also im Einzelhandel gekauft werden.

Höchste Wasser-, Stoß- und Staubschutz-Klassifizierung (IP55) am Markt, Lagertemperatur zwischen -30°C bis +60°C

zurück ins Leben!

Visuelle, akustische und grafische Anweisungen inkl. Lebensrettungskreis

EKG Darstellung am Display
(wenn gewünscht)

Wenn nötig, steht der Schock sofort zur Verfügung, **keine verzögerte Aufladezeit**

Echtes Reanimations-Coaching

"Drücker für Drücker" über Tiefe, Frequenz und Durchführung der Herz-Lungen-Wiederbelebung, keine reine Schock-Box

Automatische Selbstkontrolle des Gerätes, der **AED Plus®** ist von der jährlichen medizintechnischen Kontrolle befreit

1 Ein-/Ausschalter

Im öffentlichen Raum wird nach dem Einschalten des AED gleichzeitig die Leitstelle über den Notfall informiert.

2 Kontroll-Leuchte

Der regelmäßige, automatische Selbsttest überprüft alle wichtigen Funktionen und meldet Einsatzbereitschaft

3 Defibrillationselektroden

(5 Jahre haltbar) - sie erfassen den Herzrhythmus und geben den rettenden Stromstoß ab

4 Piktogramme

Blinkende Bilder und gesprochene Anweisungen führen den Anwender durch die einzelnen Schritte der Wiederbelebung und Defibrillation.

5 Reanimations-Sensor

Das Kreuz zeigt den richtigen Ort für die Herzmassage. Wird zu flach gedrückt, folgt ein Hinweis. Ein adaptives Metronom gibt die Frequenz vor.



Jeder AED rettet Leben - wie speziell der **AED Plus®** von **ZOLL!**
Dazu gibt es ein umfangreiches Zubehör

Alles, was Sie benötigen, damit Ihr **AED Plus®** stets griff- und einsatzbereit ist



◀ **Pedi-padz® II**
 speziell für Kinder
 unter 25 kg
 Art.-Nr. 8900-0804-01



CPR-D-Padz® II
 für Erwachsene
 Art.-Nr. 8900-0800-01 ▶



AED Plus® Simulator
 Art.-Nr. 8000-0819-01



AED Plus® Demo Kit
 Art.-Nr. 8000-0834-01

... und vieles mehr



Lithium-Batterien
 Typ 123, 10 Stück
 Art.-Nr. 8000-0807-01



AED Plus® Transporttasche
 Art.-Nr. 8000-0802-01



AED Plus® Wandkasten
 Art.-Nr. 8000-0856



Standard-wandschrank
 Art.-Nr. 8000-0855



Wandschrank halb eingelassen
 Art.-Nr. 8000-0814



Wandhalterung
 Art.-Nr. 8000-0809

Ihr **AED Plus®** Partner

ZOLL®

